

# Bedienungsanleitung für die Benutzung Ihres

## Relax4U-Sessels

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für einen Relax-Sessel aus der Relax4U-Serie entschieden. Nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung wünschen wir Ihnen viel Relaxkomfort und Freude an Ihrem Sessel. Lesen Sie deshalb vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung komplett und sorgfältig durch.

### Inhalt

- Seite 2 Aufstellen des Sessels, Sicherheit.
- Seite 3 Tipptastenbedienung.
- Seite 4 Bedienung des Sessels ohne Aufstehhilfe, mit Fußstütze, keine Optionen.
- Seite 5 Bedienung des Sessels ohne Aufstehhilfe, mit Fußstütze, Option elektrische Topswing-Funktion oder elektrisch aufblasbare Lendenstütze.
- Seite 6 Bedienung des Sessels ohne Aufstehhilfe, mit Fußstütze, Option elektrische Topswing-Funktion und elektrisch aufblasbare Lendenstütze.
- Seite 7 Bedienung des Sessels mit Aufstehhilfe, mit Fußstütze, keine Optionen.
- Seite 8 Bedienung des Sessels mit Aufstehhilfe, mit Fußstütze, Option elektrische Topswing-Funktion oder elektrisch aufblasbare Lendenstütze.
- Seite 9 Bedienung des Sessels mit Aufstehhilfe, mit Fußstütze, Option elektrische Topswing-Funktion und elektrisch aufblasbare Lendenstütze.
- Seite 10 Bedienung des Sessels mit Gasdruckfeder, mit Fußstütze, keine Optionen.
- Seite 11 Bedienung des Sessels mit Bluetooth-Fernbedienung (Grundfunktionen).
- Seite 13 Bedienung des Sessels mit Bluetooth-Fernbedienung (optionale Funktionen).
- Seite 14 Bedienung des Sessels mit Bluetooth-Fernbedienung (Lieblingspositionen).
- Seite 15 Verbinden der Bluetooth-Fernbedienung.
- Seite 16 Zurücksetzen (Reset) des Sessels.
- Seite 17 Gebrauch des Akkus.
- Seite 19 Bezug: Leder.
- Seite 21 Bezug: Stoff.

## 1.1 Aufstellen

- Der Sessel muss auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden. Wird ein Sessel nicht auf einem ebenen Untergrund aufgestellt, verursacht dies Schäden am Verstellmechanismus und kann ein knarrendes Geräusch im Verstellmechanismus zur Folge haben. Berücksichtigen Sie beim Transport des Sessels den Boden. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich zur Vermeidung von Beschädigungen, Filzgleiter unter den Fuß des Sessels zu kleben. Wir übernehmen keine Verantwortung für durch den Sessel verursachte Beschädigungen des Bodens. Heben Sie Ihren Sessel niemals an der Oberseite der Armlehnen an. Beim Transport des Sessels heben Sie diesen an der Unterseite der Armlehnen oder am Seitenpaneel an.
- **Falls Ihr Sessel über einen Akku verfügt, müssen Sie diesen, nachdem der Sessel ausgepackt ist, ca. 6 bis 8 Stunden aufladen. Ab Werk ist der Akku nicht vollständig geladen. Unter Punkt 4.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.**
- Vermeiden Sie, Ihren Sessel in direkter Sonne oder in der Nähe eines Kamins / Holzofens aufzustellen. Dies dient der Vermeidung von Verfärbungen / Verformungen des Sessels.

## 1.2 Sessel

- Achten Sie beim Bedienen Ihres Sessels darauf, dass Kinder oder Haustiere nicht zwischen den beweglichen Teilen eingeklemmt werden. Lassen Sie den Sessel nicht von Kindern bedienen oder diese damit spielen!
- Die Sessel mit Aufstehhilfe sind mit einer Bremse (Zahnrad) versehen, die den Sessel „feststellen“, wenn die Aufsteh-Funktion verwendet wird. Wenn Sie in dem Moment, in dem der Sessel in der Aufsteh-Funktion steht, vom Sessel aufstehen wollen oder im Sessel sitzen wollen, dürfen Sie dies nur, wenn der Sessel „festgestellt“ ist und sich nicht mehr drehen kann! Ist der Sessel nicht „festgestellt“, besteht die Möglichkeit, dass sich der Sessel dreht, wodurch Sie sich nicht abstoßen können. Wir sind nicht für Schäden und / oder Verletzungen, die durch den falschen Gebrauch der Aufsteh-Funktion verursacht wurden.

## 2. Tiptastenbedienung.

An der Innenseite der Armlehne oder bei einigen Modellen seitlich der Sitzfläche befindet sich die Tiptastenbedienung, mit der Sie den Sessel bedienen.

Die Tiptastenbedienung kann sowohl in Silber als auch in Schwarz ausgeführt sein. Die Farbe ist von dem von Ihnen gewählten Fuß abhängig.

Abhängig von den von Ihnen für den Sessel gewählten Optionen, bieten wir verschiedene Ausführungen. Im nachstehenden Schema können Sie nachvollziehen, welche Erläuterung für Ihren Sessel zutrifft.

### Ihr Sessel hat keine Aufsteh-Funktion:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ==> Sie verfügen über keine zusätzlichen Optionen                        | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.1 |
| ==> Sie verfügen als Option über eine elektrische Topswing-Funktion      | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.2 |
| ==> Sie verfügen als Option über eine elektrisch aufladbare Lendenstütze | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.2 |
| ==> Sie verfügen über beide zusätzlichen Optionen                        | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.3 |

### Ihr Sessel hat eine Aufsteh-Funktion:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ==> Sie verfügen über keine zusätzlichen Optionen                        | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.4 |
| ==> Sie verfügen als Option über eine elektrische Topswing-Funktion      | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.5 |
| ==> Sie verfügen als Option über eine elektrisch aufladbare Lendenstütze | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.5 |
| ==> Sie verfügen über beide zusätzlichen Optionen                        | ==> Lesen Sie Erläuterung 2.6 |

## 2.1 Bedienung des Sessels (ohne Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren, aber keine zusätzliche Option. Ihr Bedienpaneel hat 3 Tasten.



**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**


Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.

Die mittlere Taste (2 - Sitzfläche Neigung) dient der Bedienung der Horizontalfunktion. Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Horizontalfunktion in die entgegengesetzte Richtung.

Die hintere Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.

## 2.2 Bedienung des Sessels (ohne Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren und eine zusätzliche Option. Ihr Bedienpaneel hat 4 Tasten.

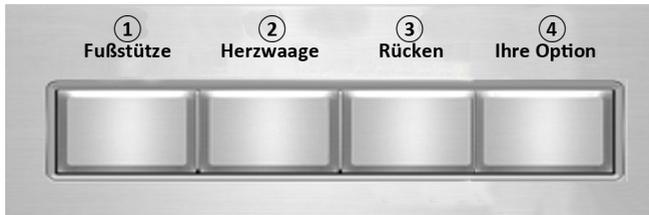

**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**

Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.


Die mittlere Taste (2 - Horizontalfunktion) dient der Bedienung der Horizontalfunktion. Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los. Drücken Sie sie erneut, bewegt sich die Horizontalfunktion wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Die dritte Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.

Die hintere Taste (4 - Ihre Option) dient der Bedienung der zusätzlichen Option. Das kann eine elektrische Topswing-Funktion oder die elektrisch aufblasbare Lendenstütze sein. Drücken Sie diese Taste, bewegt sich die Topswing-Funktion nach vorn oder die Lendenstütze wird aufgeblasen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Topswing-Funktion wieder zurück oder leert sich die Lendenstütze.

## 2.3 Bedienung des Sessels ohne Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren und zwei zusätzliche Optionen. Ihr Bedienpaneel hat 5 Tasten.

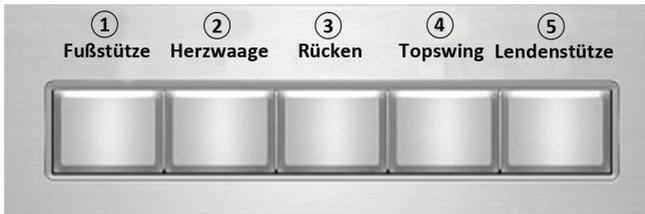

**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**

Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.

Die mittlere Taste (2 - Sitzfläche Horizontalfunktion) dient der Bedienung der Horizontalfunktion. Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los. Drücken Sie sie erneut, bewegt sich die Horizontalfunktion wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Die dritte Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.

Die vierte Taste (4 - Topswing-Funktion) dient der Bedienung der elektrischen Topswing-Funktion. Drücken Sie diese Taste, bewegt sich die Topswing-Funktion nach vorn. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Topswing-Funktion wieder nach hinten.

Die hintere Taste (5 - Lendenstütze) dient der Bedienung der elektrisch aufblasbaren Lendenstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Lendenstütze aufgeblasen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, leert sich die Lendenstütze wieder.

## 2.4 Bedienung des Sessels (mit Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren und eine Aufstehfunktion, aber keine zusätzliche Option. Ihr Bedienpaneel hat 3 Tasten.



**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**

Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.

Die mittlere Taste (2 - Aufstehhilfe) dient der Bedienung der Aufstehhilfe. Damit können Sie den Sessel in seine Aufstehposition bringen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Sessel in die Neutralposition zurück.


Die hintere Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.

Zur Aktivierung der Horizontalfunktion drücken Sie gleichzeitig beide Tasten (2+3). Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Tasten mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie anschließend Taste 2 erneut, bewegt sich der Sessel aus der Horizontalposition in die Neutralposition zurück.

*Die Aufstehfunktion kann nur bedient werden, wenn die Fußstütze geschlossen und die Rückenlehne aufrecht steht.*

## 2.5 Bedienung des Sessels (mit Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren und eine Aufstehfunktion und eine zusätzliche Option. Ihr Bedienpaneel hat 4 Tasten.

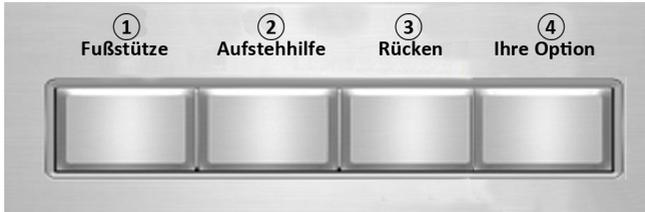

**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**

Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.

Die zweite Taste (2 - Aufstehhilfe) dient der Bedienung der Aufstehhilfe. Damit können Sie den Sessel in seine Aufstehposition bringen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Sessel in die Neutralposition zurück.

Die dritte Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.


Die hintere Taste (4 - Ihre Option) dient der Bedienung der zusätzlichen Option. Das kann eine elektrische Topswing-Funktion oder die elektrisch aufblasbare Lendenstütze sein. Drücken Sie diese Taste, bewegt sich die Topswing-Funktion nach vorn oder die Lendenstütze wird aufgeblasen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Topswing-Funktion wieder zurück oder leert sich die Lendenstütze.

Zur Aktivierung der Horizontalfunktion drücken Sie gleichzeitig beide Tasten (2+3). Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Tasten mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie anschließend Taste 2 erneut, bewegt sich der Sessel aus der Horizontalposition in die Neutralposition zurück.

*Die Aufstehfunktion kann nur bedient werden, wenn die Fußstütze geschlossen und die Rückenlehne aufrecht steht.*

## 2.6 Bedienung des Sessels (mit Aufstehhilfe / mit Fußstütze) mit den Tipptasten in der Armlehne oder im Sitzpaneel.

Ihr Sessel besitzt 3 Motoren und zwei zusätzliche Optionen. Ihr Bedienpaneel hat 5 Tasten.

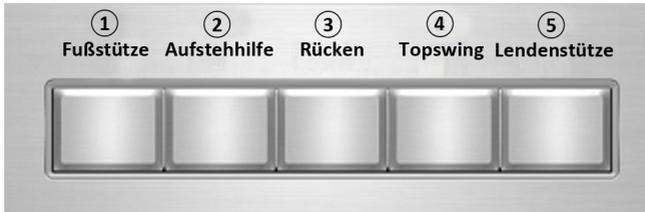

**Jede Taste hat eine doppelte Belegung (Funktion F1 und F2): Durch das Drücken der Taste bewegt sich ein Motor. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung.**

Die vordere Taste (1 - Fußstütze) dient der Bedienung der Fußstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Fußstütze ausgeklappt. Ist die Fußstütze komplett ausgeklappt, wird sich der Sessel weiter in die Horizontale bewegen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegen sich die Horizontalfunktion und die Fußstütze in die entgegengesetzte Richtung.

Die zweite Taste (2 - Aufstehhilfe) dient der Bedienung der Aufstehhilfe. Damit können Sie den Sessel in seine Aufstehposition bringen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich der Sessel in die Neutralposition zurück.

Die dritte Taste (3 - Rückenlehne) dient der Bedienung der Rückenlehne. Wenn Sie die Taste drücken, bewegt sich die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Rückenlehne wieder zurück.

Die vierte Taste (4 - Topswing-Funktion) dient der Bedienung der elektrischen Topswing-Funktion. Drücken Sie diese Taste, bewegt sich die Topswing-Funktion nach vorn. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, bewegt sich die Topswing-Funktion wieder nach hinten.

Die hintere Taste (5 - Lendenstütze) dient der Bedienung der elektrisch aufblasbaren Lendenstütze. Drücken Sie diese Taste, wird die Lendenstütze aufgeblasen. Lassen Sie die Taste mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie diese erneut, leert sich die Lendenstütze wieder.

Zur Aktivierung der Horizontalfunktion drücken Sie gleichzeitig beide Tasten (2+3). Sie neigen damit den Sessel in seiner Gesamtheit, die Fußstütze und die Rückenlehne bleiben im Verhältnis zueinander in der gleichen Position. Lassen Sie die Tasten mindestens 2 Sekunden los und drücken Sie anschließend Taste 2 erneut, bewegt sich der Sessel aus der Horizontalposition in die Neutralposition zurück.

*Die Aufstehfunktion kann nur bedient werden, wenn die Fußstütze geschlossen und die Rückenlehne aufrecht steht.*

## 2.7 Bedienung des Sessels mit Gasdruckfeder (ohne Fußstütze).

Wenn Sie sich für einen manuell verstellbaren Sessel entschieden haben, können Sie die Rückenlehne mithilfe des Hebels an der Seite Ihres Sessels stufenlos verstellen. In der Rückenlehne ist eine manuell verstellbare Topswing-Funktion integriert. Zur optimalen Unterstützung Ihres Kopfes können Sie diese nach vorn ziehen. Zusätzlich kann im Lieferumfang eine Fußablage (Hocker) enthalten sein. Diese Fußablage ist nicht zum Sitzen bestimmt.

### 3. Bluetooth-Fernbedienung.


#### 3.1 Bedienung des Sessels mit einer drahtlosen Fernbedienung.

Falls Sie sich als Extra für eine drahtlose Fernbedienung entschieden haben, ersetzt diese aus Sicherheitsgründen **NICHT** das Bedienpaneel in der Armllehne oder an der Sitzfläche. Die Fernbedienung ist für jeden elektrisch verstellbaren Sessel (mit oder ohne Aufstehfunktion) lieferbar. Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien einlegen.

Vergleichen Sie die nachstehenden Fernbedienungen mit der Fernbedienung, die zu Ihrem Sessel geliefert wurde.



Dies ist eine Übersicht der Grundfunktionen: Rückenlehne, Horizontalfunktion, Aufstehhilfe und Fußstütze.

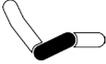Funktion	Motor(en)	Symbol	Beschreibung der Funktion
Rückenlehne	3		Die Rückenlehne bewegt sich nach hinten.
			Die Rückenlehne bewegt sich nach vorn.
Horizontalfunktion	2, 1		Die Sitzfläche neigt sich nach hinten. Wenn sie nach hinten geneigt ist, öffnet sich die Fußstütze von unterhalb der Sitzfläche.
			Die Sitzfläche neigt sich zurück in die „neutrale“ Position. Wenn sie in der „neutralen“ Position angekommen ist, senkt sich die Fußstütze unter die Sitzfläche ab.
Aufstehhilfe (optional)	2, 3		Der Sessel wird aus jeder Position zuerst in die „neutrale“ Position gebracht. Wird die Taste losgelassen und anschließend erneut gedrückt, bewegt sich der Sessel in die „Aufstehposition“.
			Der Sessel bewegt sich aus der „Aufstehposition“ in die „neutrale“ Position zurück.
Fußstütze	1, 2		Die Fußstütze wird geöffnet. Wenn diese vollständig geöffnet ist, bringt Motor 2 die Sitzfläche in die „Horizontalposition“.
			Die Fußstütze wird geschlossen. Wenn sie vollständig geschlossen ist, bringt Motor 2 die Sitzfläche erneut in die „neutrale“ Position.

Dies ist eine Übersicht der optionalen Funktionen (Tasten): Neutralposition, Kopfstütze, aufblasbare Lendenstütze und Speicherfunktionen.

Die Tasten auf dieser Seite finden Sie nur auf der Fernbedienung mit 15 und 17 Tasten.

Funktion	Motor(en)	Symbol	Beschreibung der Funktion
Startseite	1, 2, 3, 4		Der Sessel wird in die „neutrale“ Position zurückgebracht. Wenn der Sessel bereits in der „neutralen“ Position steht, passiert nichts.
Kopfstütze (optional)	4		Die Kopfstütze bewegt sich nach vorn.
			Die Kopfstütze bewegt sich nach hinten.
Lendenstütze (optional)	Pumpe		Die Lendenstütze wird aufgeblasen.
			Die Lendenstütze leert sich.
Memory		<b>M</b>	Zur Einstellung der Memory-Funktionen. Siehe Erläuterung in Abschnitt 3.2
		<b>M1</b>	Memory-Taste 1: Siehe Erläuterung in Abschnitt 3.2
		<b>M2</b>	Memory-Taste 2: Siehe Erläuterung in Abschnitt 3.2

## 3.2 Einstellung der Lieblingspositionen (**M1 und M2**)\*

\* Diese Funktion befindet sich nur auf den Fernbedienungen mit 15 oder 17 Tasten.

Mit der Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit, zwei Lieblingspositionen Ihres Sessels zu speichern. Bevor Sie Ihre Lieblingsposition speichern, stellen Sie Ihren Sessel in diese Lieblingsposition.

- Stellen Sie Ihren Sessel in die gewünschte Lieblingsposition.
- Drücken Sie 3x kurz hintereinander die Taste **M** auf der Fernbedienung. Die Tasten auf der Fernbedienung blinken jetzt.
- Drücken Sie jetzt einmal auf die Taste mit der gewünschten Memory-Position (**M1** oder **M2**) um Ihre Lieblingsposition zu speichern.
- Ein kurzer Signalton bestätigt die von Ihnen gespeicherte Lieblingsposition.

Immer wenn Sie nun die Tasten **M1** oder **M2 gedrückt** halten, bewegt sich Ihr Sessel in die von Ihnen gewählte Lieblingsposition.



### 3.3 Verbinden der Bluetooth-Fernbedienung

Die Fernbedienung wurde werksseitig bereits eingelesen und an Ihren Sessel angepasst. Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, prüfen Sie zunächst, ob die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind und tauschen Sie diese eventuell aus. Funktioniert die Fernbedienung anschließend noch immer nicht, können Sie diese erneut mit Ihrem Sessel verbinden.


**Sehr wichtig !!! Bevor Sie die Bluetooth-Fernbedienung erneut verbinden können, muss diese zuerst zurückgesetzt (Reset) werden.**

Zurücksetzen (Reset) durchführen

- Drücken Sie die nachstehend angegebenen Tasten gleichzeitig auf der Fernbedienung **und halten Sie diese gedrückt**.




- Die Hintergrundbeleuchtung an der Oberseite der Fernbedienung blinkt.

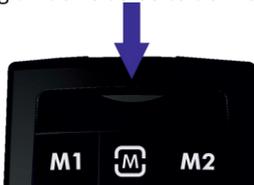

- Wenn die Beleuchtung aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet, ist das Zurücksetzen (Reset) abgeschlossen.
- Lassen Sie die Tasten erst **jetzt** los.

## Verbinden

Drücken Sie die Tipptasten 1 und 3 für ca. 10 Sekunden.

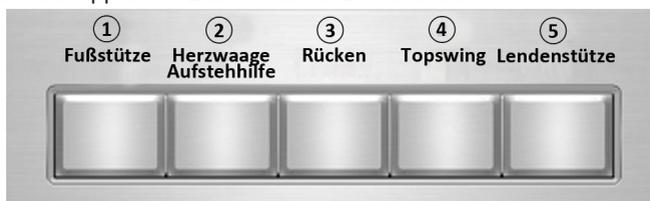

- Die Hintergrundbeleuchtung der Tipptasten blinkt blau.
- Drücken Sie jetzt die angegebenen Tasten einmal kurz auf der Fernbedienung. Ein kurzer Signalton bestätigt die erfolgreiche Verbindung.



### 3.4 Zurücksetzen (Reset) des Sessels.

Wenn Ihr Sessel nicht mehr funktioniert, ist es möglich, dass der Akku leer ist. Laden Sie den Akku wie unter Punkt 4 beschrieben auf. Wenn der Sessel danach noch immer nicht funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen (Reset durchführen). Drücken Sie dazu die (ersten) drei Tasten Ihres Bedienpaneels für länger als 10 Sekunden. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf und einer oder mehrere Motoren bewegen sich, gefolgt von einem Signalton. Danach ist das Zurücksetzen (Reset) abgeschlossen. Sie können Ihren Sessel erneut nutzen.

**Funktioniert Ihr Sessel trotzdem nicht, kontaktieren Sie Ihren Händler.**

## 4. Gebrauch des Akkus.

### 4.1 Erstmalige Aufladung vor dem ersten Gebrauch.

Damit der Akku seine vollständigen Nutzungskapazität erreicht, müssen Sie diesen mindestens 6 bis 8 Stunden aufladen. Das Ladegerät kann als Trafo verwendet werden. Sie können den Sessel ständig angeschlossen lassen, ohne dass dies zur Überladung des Akkus führt. Beachten Sie jedoch, dass sich ein ständiger Anschluss an das Ladegerät auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt.

### 4.2 Gebrauch des Akkus.

Durch den Gebrauch des Akkus sinkt dessen Kapazität. Die Nutzungszeit ist von vielen Faktoren abhängig, wie etwa vom Gewicht des Benutzers, der Umgebungstemperatur und der Gebrauchsintensität.

Während der Benutzung Ihres Sessels über das Bedienpaneel leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Tasten auf dem Bedienpaneel blau. Dies bedeutet, dass der Akku über ausreichend Kapazität verfügt.

Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung während der Bedienung rot oder hören Sie einen Signalton, müssen Sie den Akku so schnell wie möglich aufladen.

### 4.3 Aufladen des Akkus.

- Die Ladedauer ist von der Restkapazität des Akkus abhängig. Sie liegt zwischen 6 und 8 Stunden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet eine grüne Kontrollleuchte an dem Adapter/Ladegerät. Sie zeigt an, dass Netzspannung anliegt / er an der Steckdose angeschlossen ist.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Bedienpaneels rot. Wenn der Akku zu 100% aufgeladen ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung blau.
- Während des Ladevorgangs kann der Sessel normal benutzt werden.



## 4.4 Allgemeine Bedienungsanleitung Akku

- Wichtig: Beim Aufladen eines kalten Akkus (5 Grad oder kälter) müssen Sie den Akku mindestens eine Stunde vor dem Anschließen an das Ladegerät auf Zimmertemperatur erwärmen lassen.
- Der Akku darf bei Temperaturen unter 0 Grad und über 40 Grad Celsius nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie Ihren Akku ausschließlich in gut belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie nur den originalen Akku, die Originalkabel und den Original-Adapter / Ladegerät.
- Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
- Der Akku, die Kabel und der Adapter / Ladegerät dürfen bei Anzeichen von Beschädigungen nicht verwendet werden. Falls Sie Beschädigungen feststellen, müssen Sie Ihren Händler zum Austausch der Teile kontaktieren.
- Der Akku muss mit der erforderlichen Sorgfalt verwendet werden. Lassen Sie ihn deshalb nicht fallen, setzen Sie ihn keinen Stößen und starken Vibrationen aus.
- Setzen Sie den Akku keinem offenen Feuer aus.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser ein.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.

## 4.5 Umwelt

Entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie diesen bei einer von der Gemeinde angewiesenen Sammelstelle ab. Dadurch leisten Sie einen Beitrag zu einem saubereren Lebensumfeld bei.

**Wichtig: Der Akku muss auch im Falle keiner oder einer geringen Benutzung einmal alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden.**

**Für den Akku und das Ladegerät gilt eine Garantie von 1 Jahren.**

## 5. Bezug

### 5.1 Leder

#### Pflege

Wir als Möbelfabrik „De Toekomst“ möchten Ihnen die Produkte von Oranje Furniture Care oder LCK empfehlen.

#### LEDERPFLEGE **Warum muss Leder gepflegt werden?**

- Leder besitzt nach dem Gerben noch einen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 12%. Unter anderem durch die Zentralheizung und den Einfluss von Licht kann das Leder mit der Zeit austrocknen.
- Sonnenlicht und auch künstliches Licht bleichen das Leder aus. Vor allem Anilin- und Vintage-Leder (Afrika, Vintage, Rancho, Puur und Royal) sind empfindlich dafür.
- Durch die Einflüsse der UV-Strahlung verlieren Anilin- und Vintage-Leder ihre Farbe und fühlen sich hart und trocken an. Bei imprägniertem Leder kann dies Krakelee (feine Risse) verursachen.
- Durch den normalen, täglichen Gebrauch entsteht eine sogenannte Gebrauchsverschmutzung auf dem Leder. Diese Verschmutzung besteht u.a. aus Bekleidungssteilchen, Schweiß, Hautfetten und Staub. Sie verstopfen die Poren des Leders und setzen sich in der Maserung fest. Fette können sich unter Einfluss von Licht in Fettsäuren umwandeln. Es ist auch möglich, dass das Leder auf den erhöhten Säuregrad des Benutzers reagiert. Die Säure greift die oberste Lederschicht an.
- Die Schönheit des Leders kann durch eine 2-4 malige\* Reinigung pro Jahr mit dem Natural Leather Cleaner oder dem milden Reiniger Keralux® erhalten werden. Anschließend sollte das Leder mit dem empfohlenen Protector oder Spray geschützt werden. Gleichzeitig wird damit einem frühzeitigen Ausbleichen, vor allem der dunklen Anilinfarben, entgegengewirkt. Außerdem empfehlen wir, an Stellen mit viel Hautkontakt, wie auf Armlehnen und auf dem Kopfkissen, das Leder etwas häufiger mit dem Natural Leather Cleaner oder Keralux® Soft Cleaner zu reinigen.

**Das passende Produkt einfach finden:** Auf der Website [www.relax-careproducts.nl](http://www.relax-careproducts.nl) oder [www.oranjefurniturecare.com](http://www.oranjefurniturecare.com) finden Sie für jede Lederart die passenden Pflegeprodukte.

**Schäden durch Schweiß, Hautfette und Medikamenteneinnahme:** Es gibt zahlreiche Medikamente, welche die Zusammensetzung des Schweißes beeinflussen. In einigen Fällen, beispielsweise bei einer Chemotherapie, kann der Zusammenhang mit den beschädigten Möbeln schnell hergestellt werden. Bei Blutverdünnern, Antidepressiva und anderen Medikamenten wird nicht so schnell an schädliche Nebenwirkungen in der Form von Schweiß gedacht. Wir sind keine medizinischen Fachleute, doch es besteht ein Zusammenhang mit den vorgenannten Medikamenten. Dies ist ausgesprochen ärgerlich für die Betroffenen und leider wird der Zusammenhang auch häufig zu spät erkannt. Mit anderen Worten: das Unheil hat bereits seinen Lauf genommen. Durch Schweiß und Hautfette kann sich Leder dunkler färben, es entstehen Krakelee (feine Risse) oder die oberste Schicht löst sich. Dies ist vor allem an Kontaktstellen mit der Haut sichtbar. Typische Stellen sind die (Vorderseite) der Armlehnen oder die Stelle, an der der Kopf auf dem Leder aufliegt.

## Was können Sie präventiv im Falle von Schweiß, Hautfetten und Medikamenteneinnahme tun?

Achten Sie darauf, die Stellen zusätzlich zu schützen, die mit der Haut in Kontakt kommen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Pflegefrequenz zu erhöhen. Normalerweise empfehlen wir 2 x pro Jahr eine Reinigung / Pflege. Mit den Oranje- oder Keralux®-Produkten können Sie dies bis auf 12 x pro Jahr erhöhen. Dabei ist die Reinigung ebenso wichtig wie die Pflege/der Schutz. Lassen Sie bei der Reinigung den Schaum für sich arbeiten. Nicht zu heftig schrubben, nur kurz einwirken lassen und dann mit einem feuchten Tuch abwischen. Tragen Sie das Oranje- oder Keralux®-Produkt anschließend dünn und Gleichmäßig auf. Achtung: Dünn auftragen! Bei pigmentierten Lederarten können Sie das Leder zusätzlich mit Oranje Leather Care & Protect oder Keralux® Strong Protector schützen. Der Protector enthält spezielle Inhaltsstoffe, die Ihr Sitzmöbel aus Glattleder effektiv und langfristig gegen eine frühzeitige Verschmutzung schützen.

Lederpflegeempfehlungen Oranje Furniture Care und LCK

### Komplettssets:

Geschlossenes Leder	Leather Care Kit Care & Protect	- Keralux Set P
Offenes / Geschliffenes Leder	Leather Care Kit Brushed Leather	- Keralux Set Vi
Gewachstes / Geöltes Leder	Leather Care Kit Wax & Oil	- Keralux Set S

### Einzelflaschen:

Reinigung Standard	Natural Leather Cleaner	- Keralux Milder Reiniger
Reinigung Kraftvoll	Leather Strong Cleaner	- Keralux Strong Cleaner
Geschlossenes Leder	Leather Care & Protect	- Keralux Lotion P
Offenes / Geschliffenes Leder	Brushed Leather Protector Leather Vintage Lotion	- Keralux Spray N - Keralux Lotion Vi
Gewachstes / Geöltes Leder	Leather Wax & Oil	- Keralux Lotion S

## Faltenbildung

Durch die Benutzung Ihres Sessels wird die Stelle sichtbar, an der Sie sitzen. Leder dehnt sich unter Belastung, auch bedingt durch die Elastizität des Schaumstoffes. Der sogenannte Sitzspiegel zeichnet sich auf der Sitzfläche ab. Abhängig vom Leder kann sich dieser bereits nach einigen „Sitzungen“ abzeichnen (siehe Abbildung). Dies ist normal. Sie können den Sitzspiegel begrenzen, indem Sie die Sitzfläche täglich mit den Händen „glatt“ streichen. Auch auf der Rückenlehne des Sessels zeichnen sich Gebrauchsspuren ab. Diese Falten werden auch als Nutzungsfalten bezeichnet, die sich nicht auf die Lebensdauer Ihres Sessels auswirken. Leder ist ein fantastisches Material, das durch die Nutzung immer schöner wird!



## 5.2 Stoff

### Pflege

Saugen Sie das Möbelstück wöchentlich mit einer sogenannten Möbeldüse ab. Kleine Sandpartikel erzeugen eine Schleifwirkung, durch die der Stoff schneller verschleißt. Unter dem Einfluss von Sonnenlicht verfärbt sich jeder Stoff im Laufe der Zeit mehr oder weniger. Baumwollstoffe sind empfindlicher als Wollstoffe. Allgemein verfärben sich hellere Stoffe weniger stark als dunkle Farben. Am besten ist es, direktes Sonnenlicht auf Möbeln soweit wie möglich zu vermeiden.

Als Bezüge auf einem bestimmten Modell verhalten sich nicht alle Stoffe gleich. Dies ist vor allem bedingt durch die Dehnbarkeit der verschiedenen Stoffe. Je weniger elastisch der Stoff ist, desto stärker werden Falten und Nähte auf dem Sessel sichtbar.

## 5.3 Schaumstoffe

Das Sitzmöbel passt sich Ihrer Körperform an. Auf einer harten Oberfläche mich sich der Körper dem Möbelstück anpassen. Bei Komfort-Sitzmöbeln ist dies genau umgekehrt. Die Schaumstoffprodukte passen entsprechend der Nutzungsumstände, wie der täglichen Nutzungsdauer, der Temperatur und dem Körpergewicht, langsam an. Die Anpassungsdauer wird abhängig von der Nutzung bis zu 6 Monate nach dem Erwerb in Anspruch nehmen. Nach dieser Nutzungsdauer ist das maximale Komfortniveau erreicht.

### *Polyurethan-Schaumstoff*

Polyurethan-Schaumstoff ist der Rohstoff, der hauptsächlich den Komfort bestimmt. In den Niederlanden wird dieses Produkt auch häufig als Kaltschaum bezeichnet. Das Material ist ungiftig, wird FCKW-frei produziert und ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfänglich steif ist, jedoch durch die Benutzung elastischer wird. Die Steifheit geht um ca. 15% zurück. Auf diesem Niveau stabilisiert sich das Material.

## 5.4 Allgemein

- Jeder Sessel wird mit äußerster Sorgfalt hergestellt. Die Produktion eines Sessels ist die Arbeit von Menschen. Jeder Sessel wird manuell gefertigt. Deshalb gleicht kein Sessel dem anderen. Kleine äußerliche Unterschiede sind unvermeidbar und unterstreichen die handwerkliche Fertigung Ihre(r) Sessel(s).
- Die meisten Sessel sind an der Rückseite mit einem Reißverschluss ausgestattet. Dieser Reißverschluss ist das Beziehen notwendig. Wir verwenden sogenannte blinde Reißverschlüsse. Es kann dennoch vorkommen, dass dieser schwarze Reißverschluss sichtbar ist (siehe Abbildung unten auf der Seite). Durch Spannung auf dem Bezug kann sich die Naht öffnen, wodurch der Reißverschluss sichtbar wird. Dies kann durch den Druck geschehen, der auf das Leder wirkt, sobald in dem Sessel gesessen wird. Vor allem an Stellen, an denen mehrere Lederteile zusammentreffen, kann der Reißverschluss sichtbar sein. Dies ist nicht zu vermeiden.
- Da ein Relax-Sessel aus vielen beweglichen Teilen besteht, ist es fast nicht möglich, das System geräuschlos zu verstellen. Diese Geräusche und das „Knarren“ können sowohl beim Verstellen des Sessels als auch in der neutralen Position hörbar sein.  
**Ein Knarren kann auch durch das Aufstellen des Sessels auf einem unebenen Untergrund verursacht werden.**
- Verteilen Sie Ihr Gewicht auf der Sitzfläche und die Rückenlehne. Es kann trotzdem passieren, dass Sie in Ihrem Sessel mehr auf der rechten oder linken Seite sitzen. Seien Sie sich deshalb auch darüber bewusst, dass sich Ihr Sessel „mitbewegt“. Es kann dadurch passieren, dass sich der Bezug Ihres Sessels stärker nach rechts oder links (und damit schräg) auf der Rückenlehne liegt. Der Sessel formt sich nach dem Benutzer.
- Verwenden Sie die Armlehnen Ihres Sessels nicht als Leiter, Fußbank oder Sitzplatz.
- Die Sitzfläche eignet sich nicht dazu, darauf zu stehen. Die Federung wird dort dann temporär überlastet.
- Knien Sie sich niemals auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen.